

機械器具（71） 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000（JMDNコード）

ミエルPro

【警告】車・バイク等の運転、歩行、階段昇降時、段差のある場所では使用しないでください（必ず外すこと）。

【形状・構造及び原理など】

- アクリル製の眼鏡レンズ1組と、プラスチックあるいは金属製の眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡（老眼鏡）。
- 最大レンズ度数+2.50D

【使用目的又は効果】

- 視力補正用（老眼鏡）
- 視力を補正するレンズが装着された眼鏡により、使用者の視力を補正します。

【使用方法等】

- 手元の文字等を見る際に使用します。
- 着脱時は両手でテンプルを持ち、鼻と耳に対して均等に重量がかかるように角度や位置を調整してください。
- 車やバイクの運転、歩行をはじめとする運動時には使用しないでください。

【使用上の注意】

- 乱視、近視、遠視の矯正機能はありません。
- 装着時は、テンプルで目を突かないようご注意ください。
- 目の疲労防止のため、長時間の連続使用は避けてください。
- 炎天下、火のそば、サウナ等、高温になる場所での使用は避けてください。
- マスク着用時にはレンズが曇ることがあるのでご注意ください。
- 本来の用途以外、例えば、保護眼鏡、遮光眼鏡、スポーツ用眼鏡としては使用しないでください。
- かゆみ、湿疹、かぶれを生じる等、肌に合わないときは直ちに使用を中止して、医師に相談してください。
- 鼻、耳、こめかみ等、肌に接触する部分に汚れが付着したときには、必ず拭き取ってから使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 破損・傷付防止のため、眼鏡ケース等に入れて、金属等の硬いものに接触させないように保管してください。
- 眼鏡ケース等に入れる際には、粉塵・汚れを除去してください。
- 事故防止のため、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 変形、品質劣化防止のため、高温・極低温・多湿の場所や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- 変形、品質劣化防止のため、整髪料や化粧品等を付着させたままにせず、必ず拭き取ってから保管してください。

【取扱い上の注意】

- 着脱による通常のたわみを超えるような大きな変形を伴う負荷や衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
- 乳幼児が口に入れたり、舐めたりしないようご注意ください。
- 粉塵や汚れを拭きとった際に擦り傷が生じることがあります。必要に応じて、あらかじめ水で洗い流した後に拭きとってください。
- 携帯時は眼鏡ケース等に入れて保管してください。鞆やポケットに本体を直接保管することや、本体が金属等の硬いものに接触する恐れがある保管はお控えください。
- 炎天下の自動車内には放置しないでください。

【保守点検に係る事項】

- ヒンジが緩んだ場合は、精密ドライバーで締め直してください。
- 調整方法が不明な場合は眼鏡店等でご相談ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元（お問い合わせ先）
株式会社TKZ
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目5番10-502号
電話 0120-49-3366

製造業者
Wenzhou Feihong Optical Co., Ltd
中華人民共和国